




info

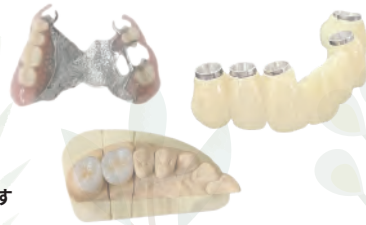

横浜の技工所「エム・エス・クリエイト」発行のニュースレターです

2020年 3月号

有限会社エム・エス・クリエイト
Newsletter 編集委員発行


ノンクラスプデンチャーをお勧めください。

インプラント手術には躊躇が、
でも、入れ歯を入れていることは知られたくない…
そんな患者様に！

歯を失った患者様でも、インプラント治療に躊躇されたり、ブリッジが設計できないケースもあるかと思えます。しかし、
クラスプが見えるようなパーシャルデンチャーも…

そんな患者様に、是非選択肢として「ノンクラスプデンチャー」をお勧めください。

弊社では、患者様にノンクラスプデンチャーをご理解いただくための啓蒙ツール(リーフレット)をご用意しております。

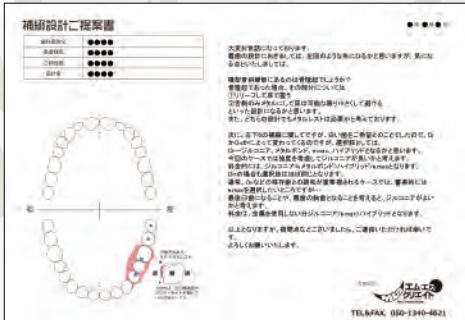

プランニングシステム

しかし、ノンクラスプデンチャーの製作には、十分な経験と知識
が必要です。

弊社はノンクラスプデンチャーにおいて高い評価をいただき、
十分な経験を積んだ技工士が担当いたします。

また、有償※1となりますが左記のような「プランニングシステム」
というサービスがございます。

ご指定のケースについて、経験豊富な担当者が設計をご提案さ
せていただきます。

是非ご利用ください。

※1	片顎	5,000
----	----	-------

※ ただし、ご提案のケースを弊社へご発注いただきましたら、
技工料より2,500円分お値引きさせていただきます。



患者啓蒙リーフレット


テクニカルインフォメーション シェードテイキング時の写真撮影について



シェードテイキング時に、弊社への参考資料として写真を撮影いただくことがあります。より正確な色調の再現のために、非常に有効な資料
となります。

さらに下記のポイントをご留意のうえ撮影いただきますと、ご指定のシェードガイドをベースにした微調整に有意義な写真となりますので、ご
参考にしていただければ幸いです。


【製作前の撮影】

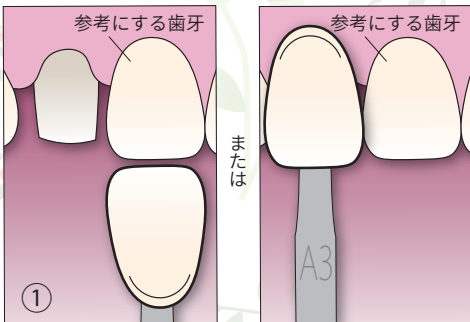

ポイント

- ①シェードガイドは参考にする歯牙に対して上下、あるいは真横に並べてください。
- ②シェードガイドと参考にする歯牙は、頬舌（前後）的位置も可能な限り揃えてください。
※フラッシュからの距離（深度）を揃えるためです。

【再製のための撮影】

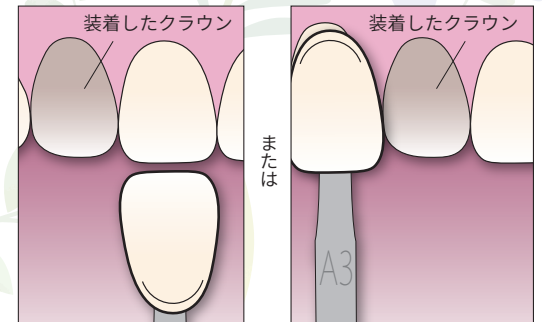

ポイント

クラウンのシェードが、周囲の歯牙と調和しないために再製
する場合、クラウンは装着した状態で撮影してください。

歯牙は比較的早く乾燥し、白色化いたします。開口後、できるだけ早く撮影してください。目安は約1分以内とされていますが、経過した場合は
一旦閉口してもらった後、水で湿らせてください。

有限会社



〒232-0008 神奈川県横浜市南区庚台32-6

TEL/FAX : 050-1340-4621 月~金(土日・祝休)

9:00~18:30

エムエスクリエイト



弊社WEBサイト

Instagram

