

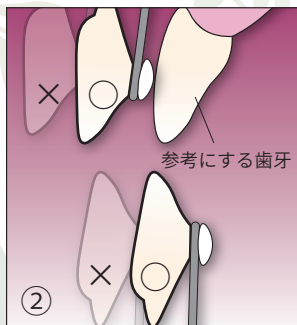


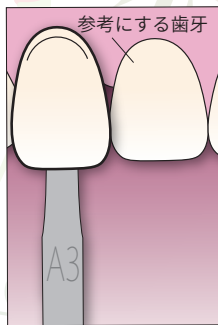

シェードテイキング時に、弊社への参考資料として写真を撮影いただくことがあります。より正確な色調の再現のために、非常に有効な資料となります。

さらに下記のポイントをご留意のうえ撮影いただきますと、ご指定のシェードガイドをベースにした微調整に有意義な写真となりますので、参考にしていただければ幸いです。



【製作前の撮影】

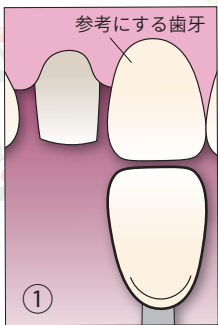

ポイント

- ①シェードガイドは参考にする歯牙に対して上下、あるいは真横に並べてください。
- ②シェードガイドと参考にする歯牙は、頬舌（前後）的位置も可能な限り揃えてください。
※フラッシュからの距離（深度）を揃えるためです。

【再製のための撮影】

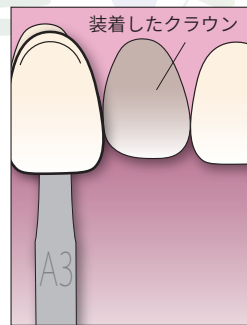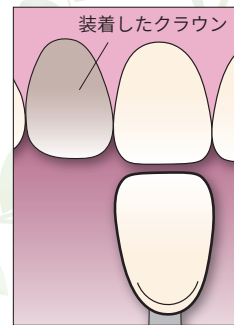

ポイント

クラウンのシェードが、周囲の歯牙と調和しないために再製する場合、クラウンは装着した状態で撮影してください。

歯牙は比較的早く乾燥し、白色化いたします。開口後、できるだけ早く撮影してください。目安は約1分以内とされていますが、経過した場合は一旦閉口してもらるか、水で湿らせてください。