

フレキシブルデンチャーのクラスプ維持力調整法

エム・エス・クリエイティブのノンクラスプ・デンチャー「フレキシブルデンチャー」は、床に熱可塑性樹脂を使用しており、パーシャルデンチャーの宿命である維持力の経年的な緩みも、下記の方法で院内での調整が可能です。


1.

市販のヒートガンを用意します。
(ホームセンターなどで購入できます。)



2.

調整したい義歯のクラスプ部を熱します。(300℃以下)
※熱しすぎると義歯が溶けますので十分注意してください。
(特に古く樹脂が劣化している場合は溶けやすいです。)
※厚みによって熱する時間は異なります。

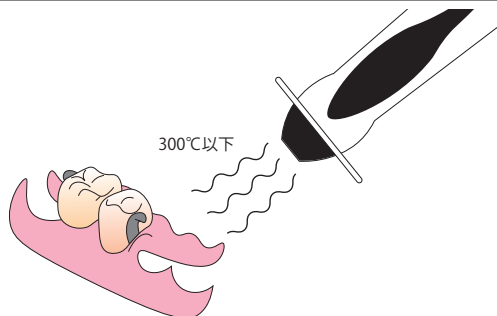

距離と時間の目安

ヒートガンの吹き出し口から約3cm


●調整部厚み 1.0mm で 10秒熱すると柔らかくなります。

●調整部厚み 1.7mm で 10秒 × 2回熱すると柔らかくなります。(20秒続けると熱しすぎる可能性があります)

※あくまでも弊社所有のヒートガンでの目安です。熱しすぎに十分注意してください。

3.

クラスプの根元を両サイドからつまんで締めます。
※鉤歯が2歯ある場合も、義歯側の歯の根元をつまむよう注意します。

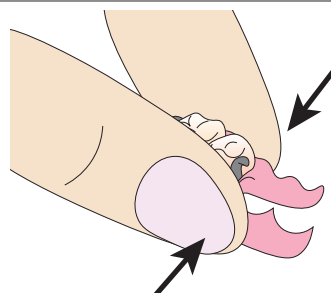


4.

クラスプの形状が相応しい形状に調整されたら、義歯を水に浸漬して冷却します。(十分冷却された時点で形状が安定します)
※凍った保冷剤を使用し、内部の熱が無くなるまで十分に冷やしてください。



5.

義歯の適合を確認し、再度調整が必要であれば上記工程を繰り返します。

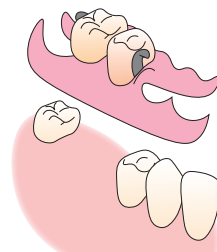

※ご連絡いただければ練習用のフレキシブルデンチャーをお送りいたします。一度練習してから実施されることをお勧めいたします。

※義歯を装着していない状態の模型を用意し、締め具合を確認しながら実施することをお勧めいたします。

※クラスプを締めすぎた場合、再度熱するとある程度開きます。

※上記は弊社製作の「フレキシブルデンチャー」の調整法です。

それ以外のノンクラスプデンチャーの場合は、製作技工所へお問合せください。

※ヒートガン使用時は、火傷等にご注意ください。

有限会社



〒232-0008 神奈川県横浜市南区庚台32-6

TEL/FAX : 050-1340-4621 月~金(土日・祝休)
9:00~18:30

エムエスクリエイティブ



弊社WEBサイト



2019_10