


フレキシブルデンチャーの患者メンテナンスについて

「フレキシブルデンチャー」は、ノンクラスプ用熱可塑性ポリアミド樹脂を使用しております。患者様にお渡しするメンテナンス説明書内容に沿ってご指導ください。

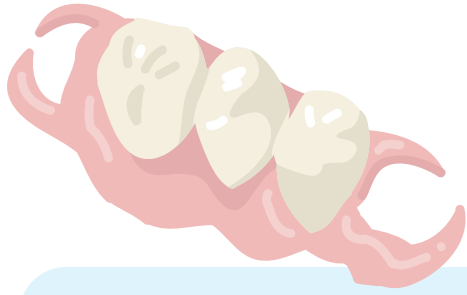

フレキシブルデンチャーのご注意 (患者様用説明書と同文)

1. まず義歯に慣れましょう

フレキシブルデンチャーは、従来の義歯と違いとても清潔でバクテリアが付着しづらく、金属を使用していない為、大変軽く見た目も良く、従来の義歯よりも違和感が少ないです。しかし、やわらかい粘膜(歯茎)の上に乗るものですから痛みを生じることもあります。

その時は、調整を何回か行います。ご連絡の上ご来院下さい。

2. 義歯を破損しない様にしましょう

ご自分で義歯の調整は絶対にしないで下さい。合わなくなります。

硬い物の上に落としたり、熱湯や火に近づけたりしないで下さい。変形、変色の原因となります。

義歯の取り外しが難しい場合は、必ずご来院下さい。調整いたします。無理な取り外しは、破損の原因となります。

フレキシブルデンチャーは、修理に時間がかかります(約1週間程度)。取り扱いには十分注意して下さい。

3. 義歯を清潔に保ちましょう

フレキシブルデンチャーは、従来の義歯に比べて【バクテリア】【におい】【汚れ】が付着しづらいですが、毎食後外して歯ブラシで軽く汚れを落とす程度にブラッシングして下さい(強くこすらないで下さい)。歯磨き粉はつけないで下さい。

就寝時に義歯を外す場合、フレキシブルデンチャーは水につけて保管する必要はありません(なくさない様に保管して下さい)。

この義歯は入れ歯洗浄剤の使用ができます。

入れ歯洗浄剤のご使用は、1日1回程度で数分にして下さい。サンプルをお渡しいたしますのでお使い下さい。

入れ歯の洗浄に【漂白剤】【アルコール】【熱湯】等をご使用されますと、変色を起こすことがあります。保証が効かないことがありますので、必ず指定された洗浄剤(中性の物)をお使い下さい。

入れ歯の汚れがどうしても取れない場合は、ご相談していただきますようお願い致します。


4. 定期的に検診を受けましょう

歯茎が痩せてきたり、義歯を支えている歯が弱くなったりすると、義歯がかたついてきます。その様な時は、ご連絡下さい。このかたつきは、義歯の破損、歯茎等の傷などの問題を起こします。

異常がなくても3ヶ月もしくは半年に1回程度は、義歯や歯茎の状態の確認の為、点検・調整にご来院下さい。

補足

フレキシブルデンチャーは非常に薄く、高い適合で仕上げております。取り外しについてはセットの際にしっかりとご指導ください。どうしても取り外しが困難な患者様には、爪の入る溝(右図)などの設計も承りますので、ご相談ください。

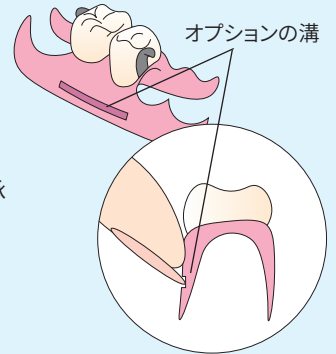


フレキシブルデンチャーの床材料であるポリアミド(ナイロン)は、一般的な床材料である床用レジンと比べて粘り強く、またバクテリアが付着しにくい反面、傷つきやすいという特徴があります。

フレキシブルデンチャーの納品時に同封しております義歯用のブラシカスポンジ等で優しく汚れを落とすして下さい。

また、洗浄剤のサンプルとして「タフデント(小林製薬)」をお付けしておりますので、同様の中性の洗浄剤をご使用ください。洗浄剤には漂白剤も含まれますので、浸漬は5分程度にとどめてください。



5分程度

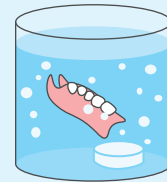

中性の洗浄剤



⚠️ 注意:

一部PMMAレジンを使用します「ハイブリッドデンチャー」につきましては、就寝時には水につけて保存する必要があります。



有限会社



〒232-0008 神奈川県横浜市南区庚台32-6

TEL/FAX : 050-1340-4621 月~金(土日・祝休)

9:00~18:30

エムエスクリエイト



弊社WEBサイト

インスタグラム

